



Benyttelse af Protect Me Maske.

Inden du benytter vores ansigtsvisir bedes du venligst læse monteringsvejledning og anbefalinger for korrekt benyttelse.

- Du bedes venligst tjekke at alle dele til samling af ansigtsvisiret er vedlagt og følg dernæst instruktionen for korrekt samling.
- Langvarig brug/benyttelse af ansigtsvisiret kan medføre hudgener. Vi anbefaler, at du tager visiret af hver time i 5 minutter.
- Skærmen i ansigtsvisiret, er buet og kan resultere i refleksioner, som muligvis kan forårsage hovedpine.
- Personer der lider af klaustrofobi, frygt og lignende bør ikke benytte visiret.
- Ansigtsvisiret er ikke slagfast og bør ikke benyttes i byggebranchen og lignende brancher.
- Ansigtsvisiret er med til at reducere risikoen for at blive ramt af stænk af vira samt bakterier i ansigtet.
- Vi anbefaler altid god hygiejne, med håndvask og/eller håndsprit når visiret berøres.
- Opbevares tørt og ikke i direkte sollys.
- Hvis visir bliver ridset, udskiftes visiret.
- Produktet er testet iht. EN166:2001

Rengøring af ansigtsvisiret:

Vi anbefaler at ansigtsvisiret rengøres og desinficeres, helst i varmedesinfektion i instrumentopvaskemaskine og kan også rengøres med sprit 85%.

CE godendt - smart frame EN 166 S 3

EU Overensstemmelseserklæring (DoC) findes på <https://www.smartframe.dk/protect-me-maske>